


優肌絆[®]『口とじテープ』に関する情報(追加)

(株) ニトムズ



優肌絆[®] 角質剥離面積率の比較（貼付8時間後）

クリニック向け資料

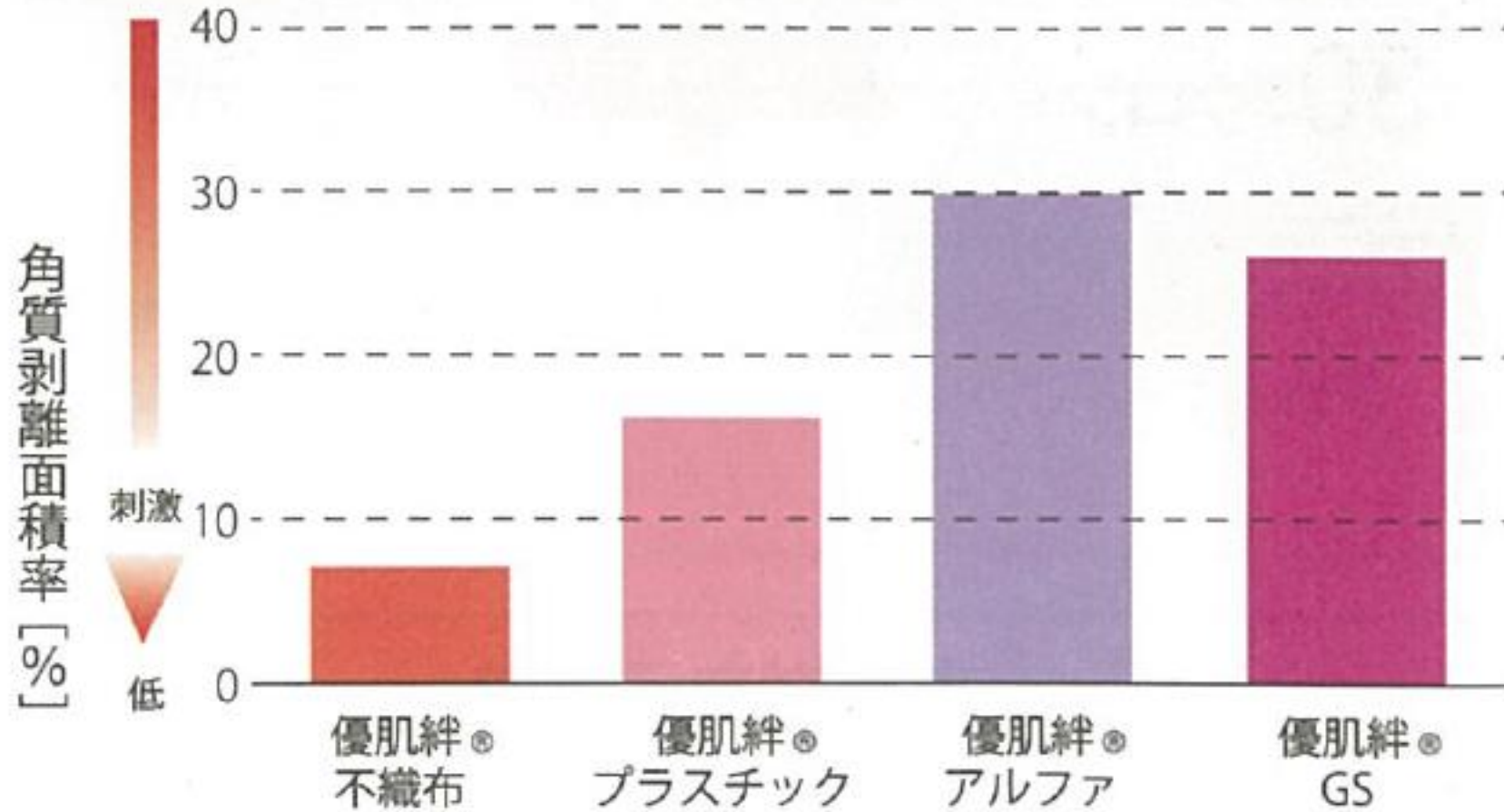


AdaBio

優肌絆[®] 固定力が強いのは？

クリニック向け資料

Q 一番チューブが抜けにくい固定法はどれでしょう？

25mmのテープで1ヶ所又は、2ヶ所で固定する場合と50mmのテープを1ヶ所で止める場合でどれが一番、固定力が強いでしょうか？

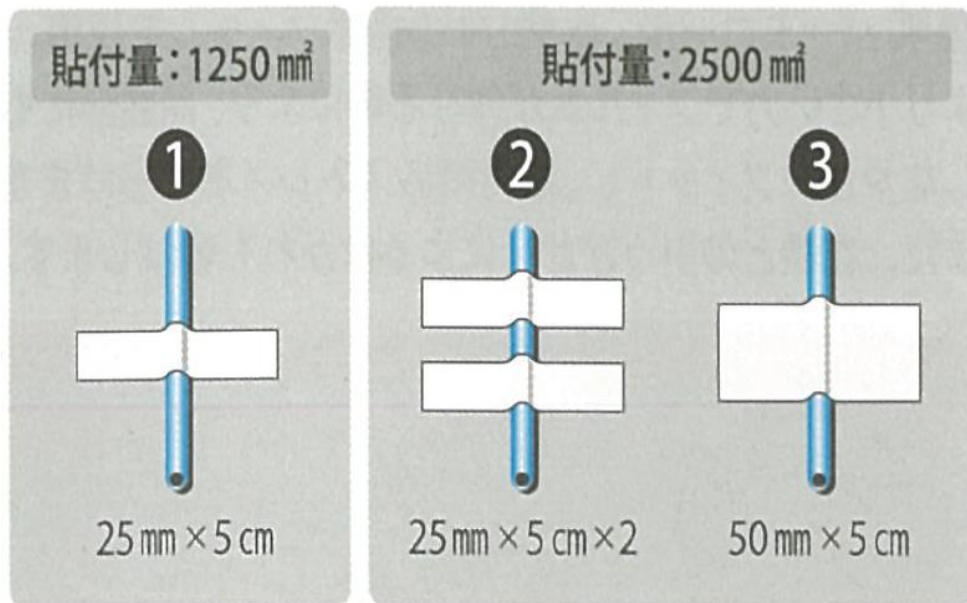

A 3 幅広テープを使用するのが効果的！

固定力を上げるために、皮膚への貼付量（面積）を増やすのが効果的です。

幅狭のテープを二枚貼るよりは、幅広テープを同じ面積使用したほうが固定力は強くなります。

